

AcryLock



AcryLock – это рельсовый замок, отливаемый тем же металлом что и бюгельный протез, с капроновыми матрицами трех степеней жесткости. Есть возможность установки без плеча противодействия сдвигу за счет направляющего паза у основания аттачмена.

Зелёная матрица - нормальная фрикция

Жёлтая матрица - средняя фрикция

Красная матрица - сильная фрикция

Благодаря новым видам матриц с пунктом ретенции беспрепятственно можно заменить матрицу. Для устойчивости допустимы только сплавы с 0,2% условным пределом текучести сверх 500N/mm².

Для точной обработки необходимо иметь **Starter-Kit Nr. 4382**.



MICRODENT-ATTACHEMENT GMBH & CO. KG

Schützenstrasse 6-8
58335 Breckerfeld
Tel. (02338) 801-0
Fax (02338) 801-40
Info@zl-microdent
www.zl-microdent.de

Номер заказа 4314

Содержание:

- 10 шт. интегрированное плечо противодействия сдвигу
- 10 шт. матрица
- 10 шт. матрица зелёная, нормальная фрикция
- 6 шт. матрица жёлтая, средняя фрикция
- 6 шт. матрица красная, сильная фрикция



Номер заказа 4315

Содержание:

- 10 шт. матрица
- 10 шт. матрица зелёная, нормальная фрикция



Номер заказа 4316

Содержание:

- 10 шт. интегрированное плечо противодействия сдвигу
- 10 шт. матрица
- 10 шт. матрица зелёная, нормальная фрикция



Номер заказа 4317

Содержание:

- 6 шт. матрица зелёная, нормальная фрикция



Номер заказа 4318

Содержание:

- 6 шт. матрица жёлтая, средняя фрикция



Номер заказа 4319

Содержание:

- 6 шт. матрица красная, сильная фрикция



Номер заказа 4319


Содержание:

- 1 шт. держатель для обеспечения параллельности Nr. 750
- 1 шт. фиксатор для матрицы Nr. 709







1 Составьте матрицу и ППС* и нанесите воск на место стыка.

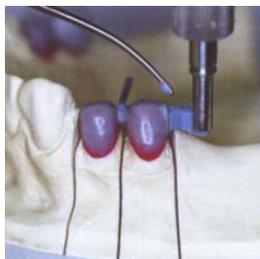

2 С помощью параллело-держателя №. 750 зафиксируйте матрицу на коронке. Укорачивание с базальной стороны.

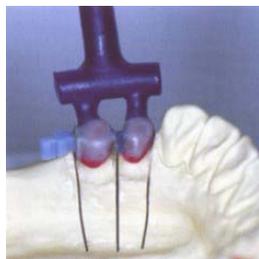

3 Прикрепите литейные каналы. 0,2% предел текучести сплава должен составлять мин. 500N/mm².

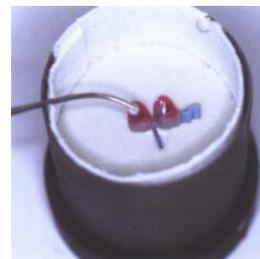

4 Выполните паковку и литье, как обычно.



5 Только после изготовления коронки полируется матрица, но не фрезеруется.



6 С помощью параллельной фрезы Ø 1,0 – 1,5 мм обработайте *ППС.




7 Для дублирования используйте зеленую матрицу. Нанесите на замок воск.




8 Воск наносится также на окклюзальные и сторонние пазу между матрицей и матрицей.



9 Модель *ППС из паковочной массы.

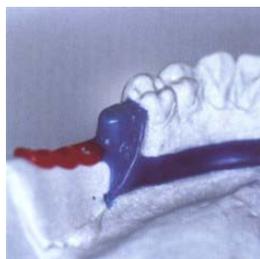

10 Изолируйте замок и *ППС слоем воска толщиной около 0,7 мм.

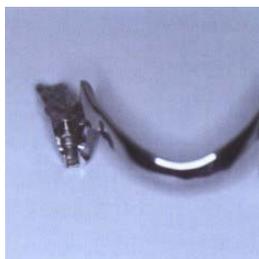

11 Отделка модельного литья. **Внимание! Не повредите пункт ретенции для матрицы.**



12 Фиксатор №. 709 с зеленой матрицей. **Внимание! Соблюдайте позицию ретенционной пазы!**



13 Зафиксируйте матрицу в модели, пока она не заскочит.



14 Если нужно сократить трение, то отполируйте матрицу.



15 Завершите работу как обычно.



16 Готовая работа с базальной стороны.

*ППС – плечо противодействия сдвигу



MICRODENT-ATTACHEMENT GMBH & CO. KG

Postfach 360 . Schützenstrasse 6-8 . 58335 Breckerfeld . Tel. (02338) 801-0 . Fax (02338) 801-40

Info@zl-microdent . www.zl-microdent.de