



DEFLEX ACRYLATE

(Инжектируемый Акрилат для полных зубных протезов)

- ☼ *Очень стойкий*
- ☼ *Свободный от мономера*
- ☼ *Не требует полимеризации*
- ☼ *Сопротивление сдавливанию: 73.1МПа*
- ☼ *Сопротивление на излом: 8.4 кг/см².*

Акрилат Deflex: сополимер термо-инжектируемого полиакрилата, Специально предназначенный для полных зубных протезов.

Выпускается в виде: БОЛЬШОЙ КАРТРИДЖ (120 мм; 30.4 гр)

Как и Полиамид Deflex, он выпускается в алюминиевых тубах диаметром 22мм, готовых к инъекции этим мы избегаем дополнительных действий – пересыпания и закрывания

- ☼ *Доступные цвета: Розовый*
- ☼ *Герметично упакованный*
- ☼ *Срок годности: 1 год*
- ☼ *Держите тубы в их оригинальных пакетах в сухом месте.*
- ☼ *Если тубы не герметичны, для их использования, консультируйтесь со своим дистрибьютором.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Следуйте тем же инструкциям по инъекции, что касается зубных протезов полиамида Deflex

ВАЖНО: В отличие от зубных протезов из Полиамида, НЕЛЬЗЯ проводить гидратацию зубных протезов из Акрилата.

Перебазировка, дополнения и ремонт

Этот инжектируемый акрилат позволяет химическое соединение с акриловыми и эластичными материалами. Таким образом, это подходит для ремонта и перебазировки обычными методами.

ПАРАМЕТРЫ ИНЖЕКЦИИ

- ☼ **ТЕМПЕРАТУРА НАГЕВА = 265° C**
- ☼ **ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА = 5 - 6 Кг/см² = 5 - 6 Bar/cm² = 70 - 85 Lb/in²**
- ☼ **ВРЕМЯ НАГРЕВА = 15' Минут**
- ☼ **ВРЕМЯ ИНЖЕКЦИИ= 30'' Секунд**



www.deflex.com.ar

www.realdentcom.ru