

# Инструкция для употребления

## Acrylic Sep

Прочитайте пожалуйста внимательно эту инструкцию перед употреблением

### 1. Сфера использования

Acrylic Sep это изолянт гипс-пластмасса. Из за того, что в его содержании нет алгинатных и силиконовых компонентов, не возникает на поверхности изолированных материалов слоя изолянта. Это предназначает использование Acrylic Sep в впрыскивающей и инъекционной техниках.

### 2. Разработка

Acrylic Sep налить в ёмкость которую можно закрыть (чтобы незагрязнить при паковке) и чистой кисточкой нанести на поверхность гипса. Чтобы получить оптимальную изоляцию, необходимо хорошо очистить поверхность гипса от остатков воска. Если будут остатки воска, это может доставить возникание кристаллов, которые загрязнят базис протеза.

Acrylic Sep наносим на гипс мягкой кисточкой (температура поверхности гипса около 50 °С). Нада сделать равномерный слой без заделов. Если возникнут заделыв, надо их удалить чистой кисточкой и опять изолировать.

### 3. Хранение и срок употребления

Хранить при комнатной температуре. Упакование по оттрытии опять закрыть.

### 4. Правила безопасности и предупреждения.

Acrylic Sep возбуждает глаза и кожу. При контакте с кожей сразу помыть достаточным количеством воды. При контакте с глазами промывать чистой водой. Хранить перед детьми.

### 5. Другие предупреждения

Данные в этой инструкции бывают без умолку пополняные новыми знаниями и опытом. Поэтому рекомендуем перед использованием каждого нового упакования прочитать приложенные инструкции. Эта инструкция распространяется на материал Acrylic Sep №.зак. 520 0029 1