

FLUENCE SR

Полу-жесткий инжекционный термопластичный полиамид

Использование

Полимер для изготовления базиса протеза

Применение

- ✓ Частичные протезы
- ✓ Комбинированные с хромом

Свойства

Эластичность (гибкость-жесткость)	5206 МПа
Жидкость поглощение (гигроскопичность)	3%
Усадка	0.9%
Возможность починки (склеивание)	Нет
Присутствие мономера	Нет

Коммерческая информация

- *Алюминиевый картридж 22мм диаметр*
- *Доступный цвет: Умеренно-розовый, Безцветный*
- *Высушенные Картриджи, упакованные в пластиковые трубы, с абсорбентом*
- *Срок годности: 18 месяцев*

Параметры

- ✓ Большой картридж (120 mm; 26.6 g)
- ✓ Средний картридж (85 mm; 19.5 g)
- ✓ Малый картридж (55 mm; 12.1 g)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Хранить в прохладном сухом месте. Откройте пластиковую трубу, затем снимите пластиковую крышку с картриджа. Использовать сразу после вскрытия. Повернуть картриджи номером лота вниз, в сторону муфеля. Не использовать, если контейнер поврежден или неисправен. Обработать картридж Спреем силиконовым (типа "нейтральный" для пластиковых инъекций) по периметру, но не наносить на торцы. Также брызнуть немного смазки во внутреннюю часть печи.

Параметры инъекции

- ✓ Температура плавления = 275°C +/- 10°C
- ✓ Давление воздуха = 4 - 5 Kg/cm²
- ✓ Время плавления = 15 Minutes
- ✓ Время инъекции = 30 Seconds



Authorized Representative in the European Community

Cinterqual Soluções de Comercio Internacional Ltda.

Travessa da Anunciada, Nº10 2º Esq. F

Setúbal - Portugal

Tel./Fax +351 265 238 237

cinterqual.portugal@sapo.pt



Manufacturer

Sitio de Montevideo 2381

Lanús (C.P.:1824) - Buenos Aires - Argentina

Tel.: (+5411) 4812-9638

info@deflex.com.ar www.deflex.com.ar