

Easy-Vac 2

Аппарат для изготовления капп и индивидуальных слепочных ложек



Назначение прибора:

Изготовление ортодонтических шин и конструкций;
Конструкции для хирургии и имплантантов; Формы для временных коронок и мостов; Каппы для отбеливания; Индивидуальные слепочные ложки; Защитные каппы.

Особенности:

*Подходит для пластин-заготовок различной толщины и твердости
*EV2 оборудован деталями и узлами, направленными на обеспечение безопасности работы (шумопоглотитель, теплоизолятор, таймер отключения, предохранитель).

Технические характеристики:

Вход: 220 Вольт, 50 / 60Гц
Мощность нагревателя: 550Вт
Мощность вакуумной помпы: 1250Вт

Инструкция по применению:

1. Откройте ручку на движущей рамке.
2. Вставьте заготовку (можно использовать квадратные и круглые заготовки).
3. Закройте ручку.
4. Поднимите платформу вверх по направляющей трубке до упора.
5. Положите гипсовую модель, на платформу.
6. Включите таймер и нагреватель. (Загорится световой индикатор).
7. Подождите 2 - 2,5 минуты, пока прибор не нагреется до нужной температуры.
8. Поверните рамку с заготовкой вперед, подождите, пока пластина провиснет под нагревателем на 1 - 2 см.
9. Включите вакуум.
10. Опустите движущую платформу к главному блоку.
11. Подождите 10-60 секунд. Выключите вакуум, выключите таймер.
12. Выключите нагреватель.
13. Разверните верхний блок вправо на 180 градусов.
14. Откройте ручку на движущей плате.
15. Выньте готовую слепочную ложку.
16. Отключите аппарат от электросети.

ОСТОРОЖНО!

Верхняя рама прибора нагревается во время работы. Не прикасайтесь к верхней панели и направляющей штанге. После использования дайте прибору остыть. Нагреватель находится снизу верхней панели. Прямой контакт с нагревательным элементом чреват ожогом!

Не касайтесь прибора влажными руками!

Убедитесь в том, что вы отключили прибор от электросети после использования.

Хранение и уход:

Храните аппарат для формирования капп в местах недоступных для детей! Не храните данный прибор вблизи источников тепла и воды. Рекомендуемая температура среды: -10 ~ +70°C, при влажности 10 - 100%.

ООО «Дентаддепо ЛОТ»

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.

Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.

info@dentald.ru www.dentald.ru