

Экзактосил – силикон для дублирования

Экзактосил № 17/N 21/ Rapid 21

Руководство по применению

Перед применением внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. Область применения

В состав Экзактосил силикона для дублирования входят два компонента (компонент А и В), применяемые для изготовления дублирующих форм, предназначенных для моделей дубликатов.

2. Работа

Подготовить дублируемую модель обычным способом. В качестве дублирующей формы могут использоваться ДК – Сил продукты (каталожный № 250 0010 0). Вручную замешать компоненты А и В в соотношении 1:1 до получения однородной массы. Однородной считается масса, принявшая одинаковый цвет. Затем промешать под вакуумом. Тонкой, но не «обрываемой» струей вылить силикон в форму.

3. Технические параметры

	Экзактосил N 17	Экзактосил N 21	Экзактосил Rapid 21
Рабочее время с момента замешивания при 23 ⁰ С	5 минут	5 минут	3 минуты
Время схватывания с момента замешивания при 23 ⁰ С	30 минут	30 минут	12 минут
Линейное сжатие	1,8%	1,8%	1,8%
Твердость по Шору	17 ШорА	21 ШорА	21 Шор А
Относительное удлинение при разрыве	260%	350%	350%
Прочность в момент разрыва	0,72 Н/мм ²	1,25 Н/мм ²	0,72 Н/мм ²

4. Меры предосторожности

- 4.1 Для работы с Экзактосил силиконом необходимы защитные очки, защитные перчатки и рабочая одежда
- 4.2 Просыпанный Экзактосил создаёт опасность подскользнуться!
- 4.3 При попадании на кожу, промыть большим количеством холодной или слегка теплой водой с мылом
- 4.4 При попадании в глаза, незамедлительно промывать водой в течение не менее 15 минут, а при необходимости - обратиться к врачу
- 4.5 При проглатывании этого материала, обращаться к врачу.

5. Отходы

Отходы Экзактосила в застывшем состоянии выбрасываются как бытовой мусор. Не застывший Экзактосил уничтожается в специальных установках для сжигания отходов.

6. Хранение

Хранится Экзактосил в герметически закрытых емкостях при температуре не более 30 °С.

7. Прочее

Сведения данного руководства постоянно обновляются по мере появления новых данных и опыта. Поэтому, перед использованием новой упаковки, рекомендуем Вам каждый раз читать руководство по применению. Данное руководство предназначено для

Экзактосил N 17 каталожный № 540 0103 4, 540 0103 5, 540 0112 А, 540 0112 В, 540 0113 А и 540 0113 В
Экзактосил N 21 каталожный № 540 0102 0, 540 0102 1, 540 0102 А, 540 0102 В, 540 0103 А и 540 0103 В
Экзактосил Rapid 21 каталожный № 540 0102 2, 540 0102 3, 540 0104 А, 540 0104 В, 540 0105 А и 540 0105 В.

Официальный представитель фирмы Бредент/Аладент

Компания «РЕАЛДЕНТ» г. Воронеж Тел./факс (473) 277-64-77, 271-49-54.

www.realdentcom.ru E-mail: realdent@mail.ru